

**PeriAcryl®90-HV Adesivo  
Oral de Cianocrilato Alta Viscosidade**  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**P**

Antes de usar, ler  
cuidadosamente as  
instruções

### DESCRIÇÃO

O PeriAcryl®90-HV é um adesivo líquido de cianocrilato composto por uma mistura de n-butil e 2-octil-cianocrilatos. O PeriAcryl®90-HV é fornecido num frasco multiusos num estojo de folha de alumínio e inclui 50 aplicadores descartáveis de utilização única. O PeriAcryl®90-HV permanece no estado líquido até ser aplicado no local alvo. Após o contacto com a humidade presente nas áreas de superfície, o PeriAcryl®90-HV cura rapidamente, formando uma película que se fixa às superfícies adjacentes.

### INDICAÇÕES RECOMENDADAS

O PeriAcryl®90-HV destina-se a fixar revestimentos dentários como o COE-PAK™ no tecido gengival e/ou esmalte dos dentes, ajudando a manter o revestimento fixo e na posição correcta durante um máximo de duas semanas.

### CONTRA-INDICAÇÕES

- Em casos raros, este material poderá causar sensibilidade em algumas pessoas. Se registar esse tipo de reacções, suspenda a utilização do produto e consulte um médico.

### PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

- Abra o estojo de protecção, retire o frasco de PeriAcryl®90-HV e coloque o estojo no lixo doméstico normal.
  - Nota: O PeriAcryl®90-HV inclui um volume de 5 mL e um frasco de 10 mL para aumentar a facilidade de manuseamento.
- Segurando no frasco, gire a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir.
- Usando um dos aplicadores descartáveis de utilização única fornecidos, comprima a extremidade do bolbo e enquanto o faz, insira a ponta da pipeta na abertura no topo do frasco. Incline o frasco lentamente para que o PeriAcryl®90-HV entre em contacto com a pipeta. Deixe de comprimir o bolbo para extrair o PeriAcryl®90-HV do frasco.
  - Nota: Fornece-se uma bandeja reutilizável se o método de extracção descrito acima não for da sua preferência. Basta espremer o PeriAcryl®90-HV para um dos orifícios na bandeja e extrair usando uma das pipetas.
- O material está pronto a aplicar na superfície a tratar. Depois de concluir a aplicação, descarte a pipeta para o lixo doméstico normal. Se a bandeja tiver sido usada, limpe qualquer excedente de PeriAcryl®90-HV do orifício na bandeja usando uma toalha de papel seca.
- Antes de voltar a tapar o frasco, assegure-se de que a ponta do frasco está limpa e seca removendo o adesivo em excesso com uma toalha de papel ou gaze. Assegure-se de que a tampa é fechada com segurança e guarde o frasco de PeriAcryl®90-HV de pé, a uma temperatura de 5°C ou menos.

### APLICAÇÃO

- Depois de o PeriAcryl®90-HV ter sido carregado para a pipeta e o revestimento dentário estiver bem posicionado:
  - Coloque uma protecção ocular no paciente antes de aplicar PeriAcryl®90-HV.
  - Posicione a ponta da pipeta directamente por cima da margem do revestimento dentário.
  - Esprema o bolbo da pipeta delicadamente para extrair uma pequena quantidade de PeriAcryl®90-HV ao longo da margem do revestimento dentário que estará em contacto com a gengiva ou o dente.
    - + Nota: Tenha o cuidado de comprimir o PeriAcryl®90-HV enquanto a pipeta estiver por cima da garganta do paciente. As gotas errantes de PeriAcryl®90-HV que caírem na língua ou tecido gengival do paciente instalar-se-ão de imediato, embora desapareçam com o passar do tempo. O PeriAcryl®90-HV é inofensivo se for engolido na sua forma de polímero. O paciente irá expelir estes sólidos através de processos excretórios normais.
  - Alise gentilmente o PeriAcryl®90-HV aplicado ao longo da margem do revestimento e no tecido gengival ou no esmalte dos dentes usando a ponta da pipeta.
  - O PeriAcryl®90-HV irá fixar em menos de 30 segundos.
  - Termine esta aplicação ao longo do perímetro do revestimento dentário. Se for necessária uma maior quantidade de PeriAcryl®90-HV para além da extraída, siga os passos de preparação supra mencionados usando uma pipeta nova. Para evitar contaminação cruzada, não coloque a pipeta usada no frasco de PeriAcryl®90-HV.
  - O PeriAcryl®90-HV fixa-se de forma mais rápida quando aplicado em pequenas quantidades e espalha-se numa camada fina para aumentar a exposição da superfície. Se o tempo de assentamento parecer demasiado prolongado, poderá utilizar um cotonete com ponta de algodão para espalhar o adesivo e acelerar a polimerização.

### ADVERTÊNCIAS

- O adesivo PeriAcryl®90-HV tem a capacidade de aderir à maioria dos tecidos corporais e a muitos outros materiais, tais como luvas de látex e aço inoxidável. Evite o contacto com qualquer equipamento que não seja descartável ou que não possa ser rapidamente limpo com um solvente, tal como acetona. Não use nenhum desses químicos para remover o PeriAcryl®90-HV de locais indesejados no interior da boca do paciente.
- Se ocorrer um contacto accidental com os olhos, não tente abrir o olho. Cubra o olho com algo macio e consulte um oftalmologista imediatamente. O adesivo irá perder as suas propriedades adesivas dentro de alguns dias, e o olho irá abrir espontaneamente sem danos.
- O PeriAcryl®90-HV não adere a superfícies previamente revestidas com petróleo, por isso, evite usar esta substância em qualquer área onde seja necessária a aplicação de PeriAcryl®90-HV.
- O PeriAcryl®90-HV não é absorvível e só deverá ser usado como dispositivo de superfície. Não permita que o PeriAcryl®90-HV se entranhe sob os tecidos da superfície.
- Gera-se uma pequena quantidade de calor durante o processo de polimerização, porém, tal só deverá demorar alguns segundos e não provocará qualquer desconforto ao paciente.
- Este produto destina-se apenas a um uso externo.

### ARMAZENAMENTO

- Durante períodos prolongados, o PeriAcryl®90-HV deverá ser mantido refrigerado a uma temperatura de 5°C ou menos. Não é prejudicial manter o PeriAcryl®90-HV no congelador, abaixo de 0°C. Períodos mais curtos à temperatura ambiente (22°C) durante um total de 4 semanas não irão afectar negativamente o desempenho do produto. Evite uma exposição prolongada a temperaturas elevadas. Guarde longe da humidade, calor directo e luz directa. Não use depois da data de validade indicada na embalagem.

Para obter mais informações sobre o PeriAcryl®90-HV, visite o website  
[www.glustitch.com/periacryl](http://www.glustitch.com/periacryl)

CE



[www.glustitch.com/periacryl](http://www.glustitch.com/periacryl)



MANUFACTURED BY GLUSTITCH INC.  
#307-7188 Progress Way Delta, BC  
V4G 1M6 Canada



MT Promed Consulting GmbH,  
Altenhofstr. 80, 66386 St. Ingbert,  
Germany