

# MASTERCLEAN

Espuma antibacteriana em aerossol

## MODO DE USO:

- 1 Cuidado, evite quedas da peça protética bucal. Manipule com cuidado para evitar o risco de escorregá-la das mãos.
- 2 Agite bem o produto antes de usar.
- 3 Utilize o frasco na posição vertical ou levemente inclinado.
- 4 Asperja uma pequena quantidade, cerca de 1 a 2 vezes, em cada superfície das peças (interna e externa) a uma distância de 5 a 10 cm, ou de acordo com sua preferência. Em seguida, espalhe com uma escova dental a espuma antibacteriana MasterClean em toda a superfície do Alinhador Ortodôntico Removível, Próteses Bucais, Placas de Mordida, Aparelho de Apneia, Protetores Bucais, entre outros.
- 5 Após a espuma atingir todas as superfícies das peças, promova a escovação da peça por 30 segundos com a espuma antibacteriana MasterClean.
- 6 Em seguida, lave a peça com água corrente, removendo todo o produto das superfícies dos alinhadores, aparelhos protéticos removíveis bucais, e estará pronta para o uso.
- 7 Use após as refeições.
- 8 O uso em peças protéticas bucais gerais é recomendado para higienização diária (alinhadores ortodônticos, placas de mordida, apneia, molduras, protetores bucais, placas de clareamento, etc.).
- 9 Utilize de acordo com as orientações do cirurgião-dentista, médico ou farmacêutico.

### Composição:

Aqua (Água), Sodium Laureth Sulfate (Lauril Sulfato de Sódio), Propylene Glycol (Propileno Glicol), Alcohol (Álcool), Bronopol / Methylchloroisothiazolinone (Bromopol / Metilcloroisotiazolinona), Triclosan (Triclosan), Menthol (Mentol), Citric Acid (Ácido Cítrico)

### Precauções e Advertências

NÃO INGERIR. PRODUTO DE USO EXTERNO.  
CONTEÚDO SOB PRESSÃO.  
NÃO PULVERIZAR PERTO DO FOGO.  
NÃO PERFURAR, NEM INCINERAR A EMBALAGEM.  
Não expor a temperaturas superiores a 50° C.  
Mantenha fora do alcance de crianças.

### Em caso de intoxicação:

Disque número 0800-722-6001 com as informações dos ingredientes do rótulo.

### Contraindicação:

Disque número 0800-722-6001 com as informações dos ingredientes do rótulo.

### Cuidados e conservação:

Manter o produto ao abrigo da luz, umidade e em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

WILCOS