

Kit para Confeção de Attachments em Alinhadores Ortodônticos

1. Descrição do produto

ORTHO MASTER é um kit de uso odontológico desenvolvido para a confecção de attachments, também denominados calços ortodônticos, utilizados em tratamentos com alinhadores.

O kit é composto pela resina fotopolimerizável MATCH CLEAR, utilizada para a formação dos attachments, e pelo sistema adesivo MATCH BOND, responsável por promover a adesão da resina à superfície dentária previamente preparada.

2. Apresentação

O kit ORTHO MASTER contém:

- 02 seringas de MATCH CLEAR com 3 g cada;
- 01 frasco de MATCH BOND com 5 mL.

3. Indicação de uso

Indicado para a confecção e colagem de attachments em tratamentos ortodônticos realizados com alinhadores.

Os attachments auxiliam na movimentação dentária conforme o planejamento digital tridimensional do tratamento.

4. Instruções de uso

4.1 Profilaxia Realize a limpeza da superfície dentária com pedra-pomes e água, removendo completamente a placa bacteriana e os resíduos.

4.2 Isolamento Realize o isolamento do campo operatório para evitar contaminação por saliva. Utilize afastadores labiais, roletes de algodão ou outro método adequado.

4.3 Preparo do template Selecione o template fornecido pelo sistema de alinhadores e verifique previamente seu correto encaixe na arcada dentária.

4.4 Condicionamento ácido Aplique ácido fosfórico a 37% na área destinada à colagem do attachment pelo período de 15 a 30 segundos.

4.5 Lavagem e secagem Lave abundantemente com água e seque com jato de ar isento de óleo, até que o esmalte apresente aspecto esbranquiçado e opaco.

4.6 Aplicação do MATCH BOND Aplique o sistema adesivo MATCH BOND sobre a superfície condicionada e realize a fotopolimerização conforme a técnica clínica adotada.

4.7 Aplicação do MATCH CLEAR Preencha cuidadosamente a cavidade do template com a resina MATCH CLEAR, evitando excesso de material.

4.8 Posicionamento do template Posicione o template na cavidade oral e aplique pressão digital para garantir sua adaptação completa e o contato adequado da resina com o esmalte dentário.

4.9 Fotopolimerização Com o template devidamente posicionado, realize a fotopolimerização da MATCH CLEAR através do material transparente, dente a dente ou por quadrante, durante aproximadamente 10 a 20 segundos por attachment.

O tempo de fotopolimerização poderá variar conforme a potência e as recomendações do fabricante do aparelho fotopolimerizador.

4.10 Remoção do template Remova cuidadosamente o template, preferencialmente iniciando pelo último dente, evitando o deslocamento ou a fratura dos attachments.

4.11 Acabamento e polimento Remova os excessos de resina com brocas multilaminadas ou instrumentos adequados. Realize o acabamento e o polimento da área.

5. Recomendações importantes

Verifique previamente o formato, o posicionamento e a quantidade de attachments indicados no planejamento ortodôntico.

Em caso de descolamento, o alinhador do paciente poderá ser utilizado como guia para o reposicionamento do attachment, quando aplicável.

Mantenha o campo operatório livre de contaminação durante todo o procedimento.

6. Precauções e advertências

- Evite o contato do produto com os olhos, a pele e os tecidos moles.
- Utilize luvas e os equipamentos de proteção individual adequados durante o manuseio.
- O produto contém monômeros de acrilato, que podem provocar irritação nos olhos e na pele ou reação alérgica em pessoas sensíveis.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure orientação médica.
- Em caso de contato com a pele, lave a região com água e sabão. Se a irritação persistir, procure orientação médica.
- Não utilize o produto após o prazo de validade.
- Mantenha fora do alcance de crianças e de pessoas não habilitadas.

7. Cuidados com restaurações de porcelana

Tenha cuidado ao realizar a colagem em coroas ou facetas de porcelana, pois a posterior remoção do attachment poderá provocar fragmentação, delaminação ou fratura da restauração.

Não aplique o produto sobre coroas ou facetas finas, danificadas ou que apresentem comprometimento estrutural.

Quando necessário, prepare a superfície de porcelana utilizando um primer apropriado, seguindo as respectivas instruções de uso.

8. Condições de armazenamento

- Armazene o produto em temperatura entre 2 °C e 27 °C, protegido da luz intensa e de fontes de calor.
- Para utilização, recomenda-se que o material esteja em temperatura ambiente, entre 20 °C e 25 °C.
- Não armazene próximo a produtos que contenham eugenol, pois essa substância pode interferir na adequada polimerização do material.
- O produto é sensível à luz. Não deixe o adesivo ou a resina não polimerizados expostos à iluminação ambiente por períodos prolongados.
- Mantenha as seringas e o frasco devidamente fechados quando não estiverem em uso.

9. Validade

O prazo de validade corresponde à data indicada na embalagem do produto.

Não utilize o produto com a embalagem danificada, sem identificação ou após o prazo de validade.

10. Descarte

O descarte do produto, das embalagens e dos materiais utilizados no procedimento deve ser realizado conforme a legislação sanitária e ambiental vigente.

11. Fabricante

Wilcos do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Rua Quissamã, 910 – Quissamã
Petrópolis – RJ – CEP 25615-412
CNPJ: 01.074.837/0001-48

Contato

Telefone: (24) 3064-1000
E-mail: sac@wilcos.com.br
Site: www.wilcos.com.br

Registro ANVISA – ORTHO MASTER: 10347949047